

BORT Generation Hüftprotektor

Art. Nr. 215 900

Hüftprotektoren absorbieren bzw. verteilen die bei einem Sturz auf die Hüfte einwirkenden Kräfte und reduzieren somit das Risiko einer Fraktur des Oberschenkelhalses.



Der BORT Generation Hüftprotektor besteht aus zwei aufeinander abgestimmten Komponenten: dem funktionellen Protektorengurt und dem Protektoren-Set aus speziell stoßabsorbierendem Schaumstoff. In Kombination ergeben sie eine effektive Präventivmaßnahme und können eine deutliche Reduzierung des Frakturrisikos bei einem Sturz bewirken.

Der BORT Generation Hüftprotektor zeichnet sich durch seine einfache Handhabung und seinen hohen Tragekomfort aus. Die Schaumstoff-Polsterkissen schmiegen sich durch die dreidimensionale Formgebung und die speziellen Eigenschaften des verwendeten Materials dem Körper an und gewähren somit einen optimalen Sitz.





Gebrauchsanweisung:


Der BORT Generation Hüftprotektor kann über und unter der Kleidung getragen werden.

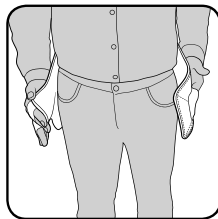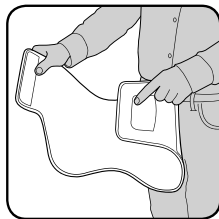

Öffnen Sie vor dem Anlegen den Klettverschluss im vorderen Bereich und führen Sie den Gurt möglichst unter Verwendung der Handschlaufen mit leichter Spannung von hinten um das Becken.

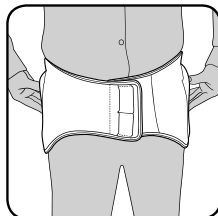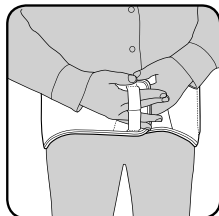

Verschließen Sie den Klettverschluss und kontrollieren Sie abschließend den korrekten Sitz der Protektor-Kissen seitlich im Bereich der großen Rollhügel (Trochanter major).

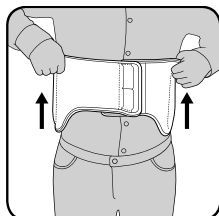

Für eine unkomplizierte Handhabung im Alltag kann der BORT Generation Hüftprotektor beim Toiletten-Gang im geschlossenen Zustand nach oben gezogen und anschließend wieder zurück in die korrekte Position gebracht werden.

Indikationen:

Sturzneigung unterschiedlicher Genese, Sturzgefährdung.

Kontraindikationen:

Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperform des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.

Materialzusammensetzung:


84 % Polyamid, 16 % Elasthan

Wichtiger Hinweis:

Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt. Wurde das Tragen bei Nacht angeordnet, Beeinträchtigung des Blutkreislaufs vermeiden. Bei Taubheitsgefühl in Hand oder Arm die Bandage lockern und ggf. abnehmen. Bei anhaltenden Beschwerden sollten Sie umgehend ihren Arzt aufsuchen.

Größeneinteilung:

Größen	Umfang Beckenkamm
small	80 – 90 cm
medium	90 – 100 cm
large	100 – 110 cm
x-large	110 – 120 cm
xx-large	120 – 130 cm
xxx-large	130 – 140 cm

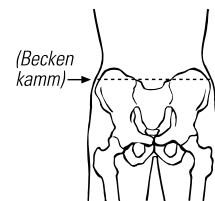**Pflegeanleitung:**

Den BORT Generation Hüftprotektor mit lauwarmem Wasser und mildem Feinwaschmittel von Hand waschen. Keinen Weichspüler verwenden. Klettverschluss schließen, um die Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. In Form ziehen und an der Luft trocknen. Hitze vermeiden. Zum Waschen beide Protektoren-Polster aus den seitlichen Taschen nach oben hin entnehmen. Bitte beachten Sie beim anschließenden Einlegen der Polster, dass die konkave Seite der Kissen zum Körper hin zeigen muss.

